

## NOTICE D'EXPÉDITION

### EXPÉDITION IMMERGÉE DANS UNE SOLUTION MULTI-ACTION

### BAUSCH & LOMB BOSTON SIMPLUS<sup>MD</sup> PENDANT JUSQU'À 30 JOURS

#### Description :

Lentille cornéenne Bausch & Lomb Boston<sup>MD</sup> GP expédiée dans une solution multi-action Boston SIMPLUS, une solution-tampon aqueuse stérile qui contient de la poloxamine, de l'hydroxyalkylphosphonate, de l'acide borique, du borate de sodium, du chlorure de sodium, de l'hydroxypropylméthyl cellulose et du Glucam, conservée avec du biguanide de polyaminopropyle (0,0005 %) et du gluconate de chlorhexidine (0,003 %).

**MISE EN GARDE :** *Non stérile. Nettoyez et traitez les lentilles avant de les porter.*

#### Précautions pour les professionnels de la vue :

- Les lentilles Boston GP sont emballées de manière non stérile dans une solution aqueuse avec agent conservateur, la solution multi-action Boston SIMPLUS. La solution est utilisée pour nettoyer, rincer, traiter, désinfecter et entreposer les lentilles Boston GP et en éliminer les protéines. Si le patient a un historique de réaction allergique à l'un des ingrédients de la solution multi-action Boston SIMPLUS, retirez la lentille de la solution et faites tremper la lentille pendant 24 heures dans une solution saline sans agent conservateur avant de la nettoyer, de la désinfecter et de la remettre au patient.
- Avant la remise au patient, nettoyez et désinfectez la ou les lentilles selon le régime d'entretien prescrit.
- Ne réutilisez jamais la solution. Vous pouvez entreposer les lentilles dans le contenant non ouvert jusqu'au moment de la remise, pendant un maximum de trente jours à partir de la date d'exécution de l'ordonnance (consultez l'étiquette de la boîte d'emballage de lentille). Si les lentilles sont entreposées pendant une période plus longue, elles doivent être nettoyées et désinfectées avec la solution multi-action Boston SIMPLUS.
- Inspectez l'emballage à la recherche de fuites ou d'autres dommages reliés à l'expédition.
- Retournez tout emballage endommagé à votre fabricant Boston autorisé.

**Remarque :** *Pour de l'information additionnelle, consultez la notice dans l'emballage Bausch & Lomb Boston GP.*

#### Entretien des lentilles par le patient :

- Les professionnels de la vue doivent étudier le mode d'emploi pour l'entretien des lentilles en compagnie du patient. Il s'agit à la fois de l'information relative à l'entretien de base des lentilles et des directives spécifiques au régime d'entretien recommandé pour le patient.
- Utilisez toujours des solutions fraîches de rinçage, de désinfection et d'entreposage.
- Lavez et rincez toujours vos mains avant de manipuler vos lentilles.

- Conservez toujours les lentilles en immersion complète dans la solution d'entreposage recommandée lorsqu'elles ne sont pas portées.
- Respectez les directives de la notice d'emballage des solutions d'entretien de lentilles. Le non-respect de ces procédures peut provoquer le développement de complications oculaires graves.

3097800

© 2007 Bausch & Lomb Incorporated

<sup>MD</sup> désigne une marque de commerce de Bausch & Lomb Incorporated.